

Bonding-Verfahren und Hinweise für Readi-Base® eXact™

Die Keramikbrackets und hybriden Metallbrackets von TPO haben eine exklusive Polymernetzbasis für eine höhere Patientensicherheit und ein einfacheres Lösen von den Zähnen. Bitte lesen Sie vor dem Bonding sorgfältig diese Richtlinien und Hinweise.

Empfohlenes Bonding-Verfahren

- 1 Prophylaxe.
- 2 Spülen und trocknen.
- 3 20-30 Sekunden mit 37%-iger Phosphorsäure ätzen.
- 4 Spülen und trocknen.
- 5 Auftragen von Primer – zum „Verdünnen“ kann Luft verwendet werden. Siehe Liste der zugelassenen Produkte weiter unten.
- 6 Foliendeckel der individuellen Bracket-Schale abziehen. Bracket mit der Bracket-Platzierungszange herausnehmen und mit leichtem Druck auf dem Zahn platzieren, um eine Haftverbindung zu bilden, die verhindert, dass sich der Klebstoff ausbreitet. Diese Haftverbindung erlaubt ausreichend Arbeitszeit für die genaue Positionierung jedes Bracket.
- 7 Sobald die endgültige Position erreicht ist, muss Druck auf das Bracket ausgeübt werden, um den Klebstoff über die gesamte Bonding-Oberfläche zu verteilen. Überschüssigen Klebstoff entfernen.
- 8 Nach den Anweisungen des Herstellers lichthärten.

Primer, die mit der TPO® Polymernetzbasis kompatibel sind

ANMERKUNG: Aufgeführte Bonding-Kits enthalten Primer.

Zur Verwendung zugelassen

TPO	Sealant Resin (empfohlen)
3M	Transbond XT Transbond Plus Self Etching Primer
Reliance	Rely-a-Bond
Opal	Opal Seal
Dentsply	Prime & Bond NT Xeno IV

Besondere Hinweise

- Alle Produkte vermeiden, die die Haftung fördern oder verstärken.
- Diese Liste der Produkte prüfen, die bekanntermaßen Verstärker enthalten.
- Primer mit Füllstoffen sind zu vermeiden, da sie für eine stärkere Haftung sorgen.
- Im Zweifelsfall an den Klebstoffhersteller wenden.



Nicht zur Verwendung zugelassen

3M	Transbond MIP Clinpro Sealant Adper Prompt L-pop
Reliance	Enhance LC Light Bond Sealant Maximum Cure Sealant System LED Proseal Assure Proseal Assure Bonding Resin
Ormco	Ortho Solo
Kerr	Optibond XTR Optibond Solo Plus Optibond All in One Optibond FL
American	Eagle FluorSure
Opal	Opal Primo Bond Enhancer
Dentsply	NeoBond Adhesive and Primer
Kuraray	Clearfil S ³ Bond Plus



TP Orthodontics Europe

TPOrtho.com